

THE EMERGENCY BANDAGE

Trauma / Wound Compression Dressing

The Emergency Bandage is the first major innovation of its kind in over 50 years!



First Care Products bietet ein innovatives Erste-Hilfe-Produkt zum Versorgen von stark blutenden, traumatischen Wunden in Notfallsituationen.

Die international patentierte, FDA und CE geprüfte Notfall-Bandage, ist die ideale Lösung für Notfallsituationen, in denen jede Sekunde zählt.

Das Produkt vereinigt Primärbehandlung, Druckapplikator, Sekundärbehandlung, einen erprobten Verschluss, um den Verband zu sichern - in einem Gerät.

Die Notfall Bandage wurde für eine rasche und effektive Ersten Hilfe entwickelt. Damit steht Laien und Profi's eine wirkungsvolle Multifunktionsbehandlung zur Verfügung.

Die Notfall Bandage ist steril, ihre nichthaftenden Auflagen sind beidseitig verwendbar. Die Bandage kann leicht angelegt und fixiert werden und hat die zusätzliche Funktion, ähnlich einer Aderpresse, Blutungen zu reduzieren. **Das Produkt ist einfach zu bedienen, dass sogar verletzte Personen den Verband mit einer Hand selbst anlegen können.**

ANWENDER

- Medizinische Notfalldienste
- Militär – Ärzte, Soldaten
 - Katastrophenhilfe
- private und kommerzielle Anwender
 - Ersthelfer
 - Erste Hilfe Sets

VORTEILE

- Erstbehandlung
- sofort direkter Druck
- Sekundärbehandlung
- schnelle, einfache Anwendung
- Bedeutende Zeit-, und Kostenersparnis



Die Notfall-Bandage ist doppelt verpackt. Auf der äusseren Verpackung ist eine Gebrauchsanleitung



Die innere Verpackung ist steril. Vacuumversiegelung verringert das Volumen. Die Bandage ist ein Einmalprodukt.

ANWENDUNG



1) setzen Sie die Auflage auf die Wunde und wickeln den elastischen Verband um den Körperteil



2) geben sie den elastischen Verband vollständig in den Druckstab



3) ziehen Sie die Bandage über den Druckstab und drücken Sie diesen auf die Auflage



4) wickeln Sie die elastischen Bandage fest über den Druckstab und die Wundauflage



5) Fixieren Sie die Enden des Verbandes.

